

■ 보증서

반드시 구입하신 판매점에서 구입일, 판매점 등을 확인한 다음 수령해 주십시오.
보증서 내용을 잘 읽으신 후 잘 보관해 주십시오. 보증서의 재발행은 하지 않습니다.

품질 보증서

- 제 품 명 : 접이식 목욕의자
- 모 델 명 : SC-4000
- 제조년월 : 별도표기
- 구입일자 : 20 년 월 일
- 고객성명 :
- 구 입 처 :
- 전화번호 :

본사의 제품을 구입하여 주셔서 감사드립니다.

■ 아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품의 이상 발생 시 보증기간(구입 후 1년)동안 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
2. 만일 고장이 생겼을 경우에는 구입처 또는 A/S센터에 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
3. 다음의 경우에는 무상 A/S에서 제외됩니다.
 - * 사용자의 취급 부주의로 인한 고장
 - * 천재지변(화재, 염해, 가스해, 풍수해, 낙뢰, 이상전압 등 기타)으로 인한 고장
 - * 임의로 개조, 변경하여 발생하는 고장
 - * 가정요양용 이외의 사용으로 인한 고장 및 손상
 - * 소프트 패드 또는 고무캡 등 소모품의 손상 및 더러움

■ 제품문의 및 A/S 신청

1. 소비자 상담실 : 031-312-3791/3
2. 상담시간 : 평일 오전 9시~오후 5시(토요일/일요일 휴무)

■ 수리, 취급 등의 상담은 먼저 구입하신 판매점에 문의해 주시기 바랍니다.



to your health

Clearview Healthcare Products, Inc.

(주)클리어뷰헬스케어
경기도 화성시 마도면 마도로 384-10
전 화 : 031)312-3791(대)
팩 스 : 031)312-3287
website: www.bedsorefree.com

kbiz 중소기업중앙회
생산물 배상책임보험 가입



to your health

Clearview Healthcare

www.bedsorefree.com

취급설명서

접이식 목욕의자 SC-4000



목 차

제품사양 및 구성-----	2P	손질 방법 및 사후관리----	5P
각 부의 명칭-----	3P	사용방법-----	6, 7P
안전상의 주의-----	4P	품질보증서-----	8P

접이식 목욕의자를 구입해 주셔서 감사드립니다.

이 사용설명서를 읽어보신 후 올바르게 사용하시기 바랍니다.

특히 『안전을 위한 주의사항』(4P)은 사용 전에 반드시

읽어보시고 안전하게 사용하여 주십시오.

제품사양 및 구성

품명/표준명	목욕의자/KSPA 2003
모델명	SC-4000
색 상	블 루
제품사이즈	(헤드레스트 부착시)510 X 650 X 970~1070mm (헤드레스트 탈착시)510 X 540 X 745~840mm
중 량	7.5kg
허용하중	95kg 이하
구성부 재료	목욕의자본체 : 알루미늄
	등받이, 좌면 : PU
	팔걸이 : EVA, 고무캡 : 합성고무
	머리받침대 : PU / 알루미늄

기능 및 특징

1. 가정이나 요양시설의 목욕실이나 화장실 등에서 고령자이신 분의 목욕이나 샤워를 보조하기 위한 제품입니다.
2. 접이식 타입으로 좁은 공간에서 보관이 용이합니다.
3. 신장에 따라 6단층으로 조절이 가능합니다.
4. 팔걸이가 부착되어 사용자에게 바른자세로 안정감과 편리함을 제공합니다.
5. 가벼운 알루미늄 재질로 사용하기 편리합니다.
6. 미끄럼을 방지할 수 있는 고무캡이 장착되었습니다.
7. 탈부착 및 조절이 가능한 헤드레스트(머리받침대)가 장착되어 사용자의 상황에 맞게 이용하실 수 있어 더욱 더 편리합니다.

각부의 명칭



안전상의 주의

⚠ 경 고 : 목욕의자 외 사용금지

잘못된 방법으로 사용하면 중대한 사고로 이어질 우려가 있어 아래의 항목을 반드시 지켜 주십시오.

- 1) 사용자가 자신의 신체를 혼자 가눌 수 없는 경우는 반드시 간호하시는 분이 시중을 들어 주십시오.
- 2) 반드시 욕실내의 평평하고 안정된 장소에 놓고 사용해 주십시오.
- 3) 목욕의자에는 2명 이상이 동시에 앉지 마십시오.
(넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
- 4) 체중 95kg이 초과되는 분은 사용하지 마십시오.
(본체가 파손되어 다칠 수 있습니다.)
- 5) 욕실 내 목욕의자 이외의 다른 용도로는 사용하지 마십시오.
- 6) 등받이를 지탱해서 이동하거나 일어서지 마십시오.
(넘어져서 부상을 당하는 원인이 됩니다.)
- 7) 사람이 앉은 상태로 본체를 들고 이동하지 마십시오.
(본체가 파손되어 부상의 원인이 됩니다.)
- 8) 의자에 앉을 때나 혼자서 일어 날 때 한 쪽 팔걸이만 잡고 강하게 힘을 주지 마십시오.(넘어져 부상의 원인이 됩니다.)
- 9) 본체를 발판 대신으로 좌면 및 팔걸이 위에 올라서거나 발을 걸치거나 하지 마십시오. (넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
- 10) 상체를 뒤로 젖혀 등받이에 체중이 너무 실리지 않도록 하십시오.
- 11) 팔걸이에 체중이 너무 많이 실리지 않도록 하십시오.
- 12) 4개의 다리가 모두 같은 높이로 설정되어 있는지 높이 조절용 누름버튼이 확실하게 세트되어 있는지 반드시 확인하십시오.
(넘어져 부상의 원인이 됩니다.)
- 13) 고무캡이 확실히 달려 있는지 확인하십시오.(미끄러져 다칠 위험이 있습니다.)
- 14) 개조와 분해를 하지 마십시오.
(본체가 정상적으로 움직이지 않게 되어 부상의 원인이 됩니다.)
- 15) 사용전에 나사의 느슨함 등 각 부에 이상이 없는지 점검하고 사용하십시오.
- 16) 의자를 접거나 펼 때 손이나 손가락을 끼우지 않도록 주의하십시오.

손질 방법

- ◆ 사용전, 후 바닥, 목욕의자에 묻은 비누등은 꼭 씻어 주십시오.
- ◆ 중성세제의 열은 액을 스폰지나 부드러운 천에 묻혀 더러움을 제거한 뒤 깨끗한 물로 세제를 씻어 내린 후 그늘에서 말리거나 마른 수건으로 닦아 주십시오.

⚠ 주의 뜨거운 물을 끼얹지 마십시오.
시트의 변형이나 파손의 원인이 됩니다.

⚠ 주의 수세미나 연마제가 들어간 스폰지 등은 사용하지 마아
주십시오.

⚠ 주의 염소계 세제, 산성, 알칼리, 신나, 크레졸 등은 절대 사용하지
말아 주십시오.
플라스틱이 열화 또는 파손되어 부상의 원인이 되는 경우가
있습니다.

보증 및 사후관리

- ◆ 보증서에 관해서
보증서는 사용설명서에 첨부되어 있으며 보증내용 등을 잘 읽으신 후 소중하게 보관하여 주십시오. 보증기간은 구입 후 1년입니다.
일반 가정용 이외로 사용된 경우는 보증기간 내라도 유상 수리에 해당 됩니다.
- ◆ 수리를 의뢰 하실 때
만일 고장이나 이상이 생겼을 때는 직접 수리, 개조 등을 절대 하시지 말고 구입하신 판매점에 상담해 주십시오.
보증기간이 지난 경우에는 구입처와 상담하여 주십시오.

사용 방법

- ◆ 사용시 몸 상태에 맞춰 편한 높이로 조정하여 주십시오.
- ◆ 사용시 바닥이 평평하고 안정된 장소에서 사용하여 주십시오.

⚠ 주의 사용전에 각부위의 볼트 등이 느슨하지 않고 고정 되어있는 것을 확인 후 사용하여 주십시오. 넘어져 다칠 위험이 있습니다.

⚠ 주의 다리는 4개를 같은 높이로 하여 주십시오. 본체가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.

가. 목욕의자를 펴고 접는 방법

접 기 : 등받이를 잡고 좌면을 등받이에 닿도록 올려 주십시오.

펴 기 : 등받이를 잡고 좌면을 앞으로 내려 주십시오.


※ 좌면이 수평이 될 때까지 완전히 편 후 사용하십시오.



나. 머리받침대 각도 조절방법


1. 각도조절 레버를 반시계방향으로 돌려 받침대를 펴 다음 사용자의 상황에 따라 머리의 위치를 놓인 다음 시계방향으로 단단히 조입니다.

※ ①/②그림과 같이 레버를 당김으로서 레버방향을 변경할 수 있습니다.

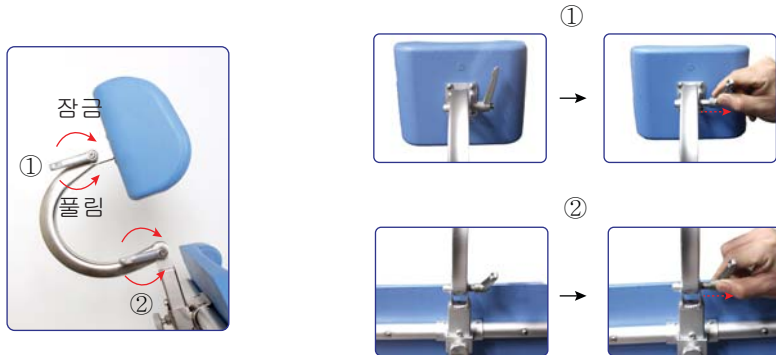

다. 좌면 높이 조정 방법


1. 버튼을 누른 상태에서 상황에 맞게 다리 위치를 조절 하십시오.
2. 누름버튼이 안보이는 경우 다리를 분리하여 조절하십시오.
3. 4개 다리의 높이를 같게 하여 사용하십시오.

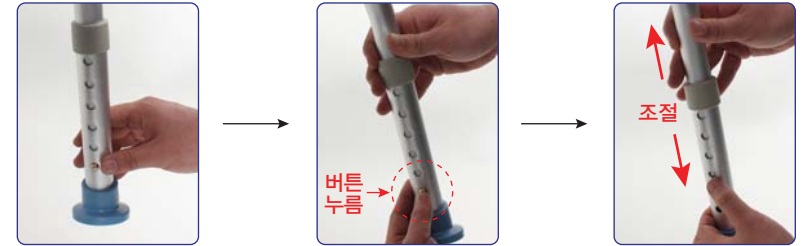

라. 머리받침대 높이 조절방법

1. 신장에 따라 머리받침대의 높이를 조절해 주십시오.
2. 제품의 높이 조절용 레버를 반시계 방향으로 돌린 후 원하시는 높이에 따라 조절 후 레버를 시계방향으로 돌려 단단히 고정시켜 주십시오.
3. 탈부착이 가능하여 보관 및 상황에 따라 사용할 수 있습니다.

⚠ 주의 과도하게 높이지 마십시오. 제품 파손의 원인이 됩니다.

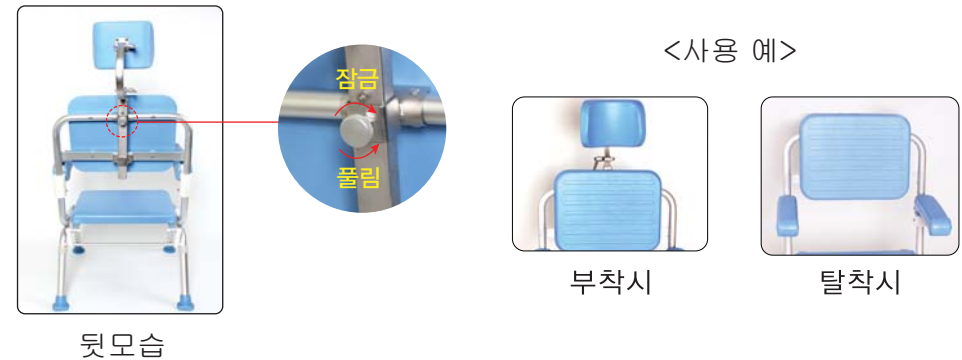

단체표준명(품명) : 목욕의자
 단체표준번호 : KSPA2003
 인증번호 : 제217호(20120927-3)
 모델명 : SC-4000
 제조년월일 : 별도표기
 제조원 : (주)클리어뷰헬스케어
 제조국 : 대한민국

품질보증

본 제품은 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함
 (사)한국고령친화용품산업협회